

Adjustable Platform Instrucciones

Items #AR500050 – AR500950, AR560150 – AR560950



Desbloquee la plataforma con el tornillo de seguro, usando el tornillo dactilar gire para poner la plataforma en cero y entonces asegure en su lugar con el tornillo de seguro.



Corte el material de registro tanto como sea necesario para que las cúspides sean visible y no haya material que interfiera con el modelo maxilar sellando apropiadamente los bordes.



Coloque la bandeja de registro dentro de la plataforma en los huecos de la bandeja, asegurándose que la bandeja este plana en la plataforma.



Coloque la plataforma en forma segura sobre la base magnética en la parte mandibular del articulador.



Asiente el modelo maxilar en la bandeja de registro en las contactos de las cúspides.



Instale la platina de montaje en la en arco maxilar, coloque el pin incisal en cero agregar yeso cuanto sea necesario.



Cierre el maxillar con la parte mandibular r y deje que seque, aplique una ligera presión en la parte superior del marco. Para prevenir que se mueva mientras seca.



Abra el articulador, retire la bandeja de registro e instale la platina espaciadora en lugar de la bandeja de mordida.



Determine el trabajo necesario, (por ejemplo: agregue 2mm de distancia incisal). Desbloquee la tabla con el tornillo manual baje la tabla 2mm y asegure el lugar con el tornillo manual, encere la parte superior de la cera